

Hjemmeplejen

Udarbejdet af: Hanne Møller og Rikke Stoklund

Godkendt i ledergruppen: april 2017

Ansvarlig: Anne Andersen

Revideret: Juli 2019

Revideres senest: Juni 2021

| | |
|--|---|
| Instruks vedrørende: Opbevaring, transport og betjening af Raizer | |
| Målgruppe | Plejepersonale i Hjemmeplejen |
| Formål | At sikre korrekt betjening af Raizer At sikre, at plejepersonalet kender til Raizer opbevaringssted i lokalområdet At sikre korrekt transport af Raizer |
| Mål | At plejepersonalet hurtigt og effektivt kan hjælpe borgere, som er faldet |
| PROCEDURE Betjening | Raizer er tilknyttet akut-telefonen i det enkelte lokalområde. Der skal foreligge en sygeplejefaglig vurdering af borgerens tilstand før forflytning med Raizer finder sted. Raizer kan betjenes af 1 eller 2 personer, alt efter situationen og kræver ingen fysisk indsats ud over en støttende hånd. Opgaven kan varetages af 1 hjælper efter den sygeplejefaglige vurdering. Maks belastning af Raizer er 150 kg med maks. 1 person på løftestolen, med fuld last kan Raizer bruges ca. 40 gange på en fuld opladning Der er udførlig brugsanvisning ved Raizer, som skal følges. |
| Opbevaringssted og transport | Raizer kan transporteres i bil og gående. Øster: Raizer er placeret i sygeplejedepotet Stranden: Raizer er placeret i en sygeplejebil kaldet Raizerbilen Vester: Raizer er placeret i sygeplejegruppen. |
| Rengøring | Efter brug skal Raizer rengøres (Raizer er ikke vandtæt og skal rengøres med en hårdt opvredet klud). Raizer leveres retur til den respektive placering, så den igen er klar til brug. |
| Rengøring ved Multiresistente bakterier | - VRE, CPE eller ESBL (Ved MRSA desinficeres der med ethanol) (se instruks F2.3.1) Ved rengøring anvendes engangsforklæde <ul style="list-style-type: none"> • Rengøring foretages med almindelige rengøringsmidler (Raizer er ikke vandtæt og skal rengøres med en hårdt opvredet klud). • Ved ophør af de supplerende hygiejniske forholdsregler, skal der foretages grundig rengøring af kontaktpunkter Udstyr/ utensilier og hjælpemidler rengøres og desinficeres. |

| | |
|--|---|
| <p>Vedligeholdes tjek</p> <p>Liftup A/S Hagensvej 21 9530 Støvring Telefon +45 96863020 Telefax +45 96863021</p> | <p>1 gang om mdr. skal AMIR kontrollere batteri kapacitet, under 10 % lyser den rød, gul for opladning og grøn for fuld opladet.</p> <p>Udover den almene vedligeholdelse, som er beskrevet i bruger manual afsnit 13 Skal der være et årligt eftersyn af en faguddannet servicetekniker.</p> <p>En gang om året vil gruppeleder/Arbejdsmiljø i hvert område modtage en mail fra firmaet om, at det er tid til det årlige tjek. – Her rekvireres der en papkasse, som leveres med videre vejledning. Efter Max 10 dage vil Raizer komme retur med et klistermærke med synsdato samt næste syn skal foretages.</p> |
| <p>Lovgrundlag Referencer Kilder</p> | <p>Bruger manual – Raizer – DK Version 1.2</p> <p>Instruks: MRSA 2014 F2.3.1 Multiresistente bakterier F2.3.2 Rengøring af hjælpemidler F3.13</p> |