




SÅDAN LOGGER DU IND I APP'EN

TRYK PÅ SKIFT LOGIN METODE

Når du har hentet app'en og er gået ind i den, skal du vælge "skift login metode"

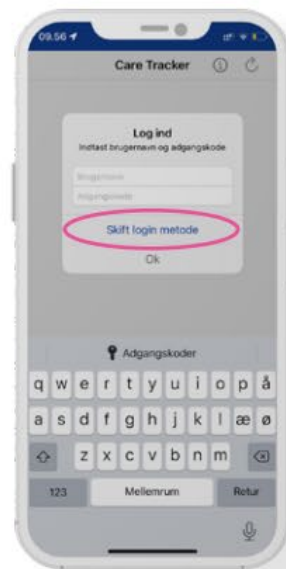

INDTAST DIT TELEFONNUMMER

Indtast det telefonnummer du er blevet oprettet med. Husk landekode.



TRYK "OK"

Når du har indtastet dit telefonnummer, så tryk "ok".




DER SENDES EN SMS

Der bliver sendt en engangskode via sms, til det indtastede telefonnummer.



KOPIER SMS-KODEN

Kopier sms-koden.

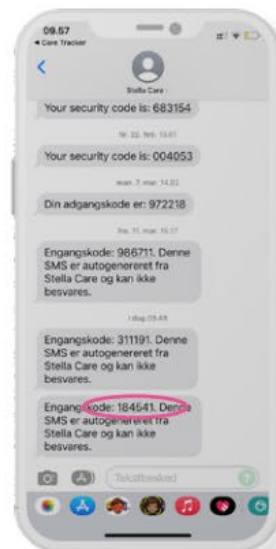

INDSÆT SMS-KODEN

Indsæt sms-koden og tryk "ok". Du kan nu administrere dine enheder.





Vores app fortæller automatisk, hvis der er noget galt

Eksempelvis hvis en GPS tracker slukkes eller hvis batteriniveaueet er lavt. Hvis der er opsat et geo fence på GPS'en, giver app'en naturligvis også en alarm, når personen med demens går uden for geo-fence området.

Brugeren kan nemt på sin telefon følge den demente persons færden via den lille GPS tracker – sekund for sekund.

App'en kan downloades til iPhone 4s og nyere, og til Android telefoner.

[SE EN VIDEO OM APP'EN →](#)

SÅ LET ER DET

Det eneste du skal bruge er en GPS enhed og vores app.

- > GPS enheden bæres af personen med demens.
- > App'en bruges af plejepersonale eller pårørende.


HVAD GØR DU HVIS PERSONEN IKKE ER VENDT HJEM?

I app'en er der en knap, som hedder "find GPS". Trykker du på den, vil personens position vises på et kort. Personens position opdateres automatisk ca. hvert 15. sekund, hvis man søger efter personen.

HVORDAN MODTAGER DU INFORMATION OM ENHEDEN?

For at gøre det nemt for dig som pårørende eller plejepersonale, kan du i app'en se vigtige informationer om GPS'en.


- > Du kan fx se batteriniveau og om GPS'en er tændt eller slukket.
- > Du kan få en alarm gennem app'en, hvis personen er uden for geofence.

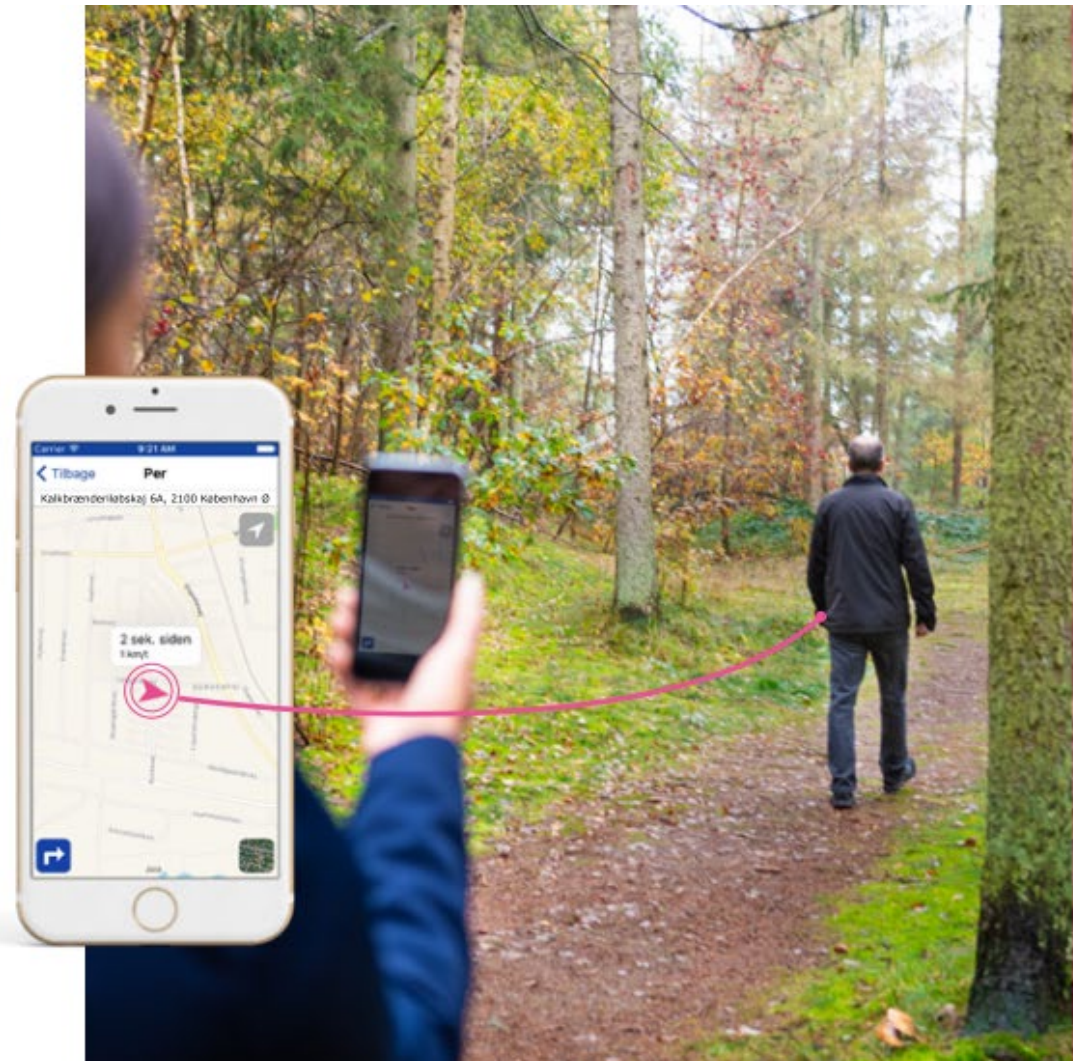



DOWNLOAD OG HENT VORES APP "CARE TRACKER"

Når du er logget ind i app'en, kan du se en oversigt over alle dine tilknyttede GPS enheder.

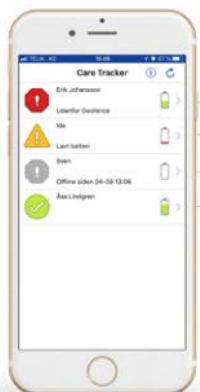

GPS enheden er udenfor geofence. Angivet med alarmsymbol samt teksten "Uden for Geofence".


Denne GPS enhed har lavt batteri og skal lades op. Angivet med advarselssymbol samt teksten "Lavt batteri".

Et gråt ikon fortæller, at GPS enheden er slukket eller uden forbindelse. Undersøg at der er strøm på GPS'en og at den er tændt.

Denne GPS enheds status er normal. Der er intet brugeren skal være opmærksom på.

KOM GODT I GANG MED APP'EN

Efter du har valgt en GPS enhed fra listen, har du følgende muligheder.

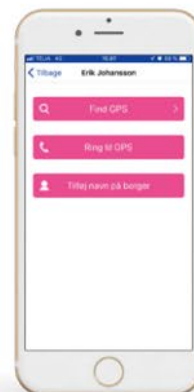

Et kort åbnes og du kan nu se GPS enhedens position.

Der ringes op til GPS enheden, som selv løfter røret, efter den har ringet en eller to gange. Der kan herefter føres en samtale.

Her kan du ændre navnet på den person, som bærer GPS enheden.

FIND GPS

Når du har trykket på "Find GPS", vises et kort. Den lyserøde pil viser GPS trackerens position og tidspunktet ovenfor angiver, hvornår positionen var sendt.

Øverst vises den nærmeste adresse.

Den blå prik viser din egen position. For at fjerne eller vise den blå prik, skal du trykke på symbolet øverst i højre hjørne.

Ønsker du at skifte mellem originalt- eller satellitkort, skal du trykke på knappen nederst i højre hjørne.

For at vise en rutevejledning fra dig til GPS'en, skal du trykke på pilen nederst i venstre hjørne.

