

Løsninger til dysfunktion af kateter á demeure

"Mekanisk" problem

- Afklemning af kateter/ urinposeslange
- Overfyldt/ fejlplaceret urinpose
- Overfyldt kateterballon
- Manglende/ fejlfiksering af kateter
- Fejlplacering af kateter
- Obstipation

Eliminer årsag

Kateterrelateret problem

Inkrustationer

Uro-Tainer® Twin Suby G
Skyllevæske med
3,23 % citronsyre

Vedvarende "blokker"

Uro-Tainer® Twin Solutio R
Skyllevæske med
6 % citronsyre

- Fnuller og slim
- Mistanke om bakteriel kolonisation på/ i kateter
- Uklar urin
- Lugtgener

Uro-Tainer® Polyhexanid
Skyllevæske med
0,02 % polyhexanid

HAR DU BRUG FOR VEJLEDNING?

KONTAKT EN AF VORES PRODUKTSPECIALISTER



Sandra Niemann
Produktspecialist/Sygeplejerske
Region Sjælland & Hovedstaden
Tlf.: 51 18 49 67
Sandra.niemann@bbraun.com



Maria Olga Tastrup
Produktspecialist/Sygeplejerske
Region Nord, Midt & Syddanmark
Tlf.: 21 39 32 42
Mariaolga.tastrup@bbraun.com

