

<b>Instruks vedrørende:</b> Autoklavering af instrumenter i hjemmeplejen	
<b>Målgruppe</b>	Alle sygeplejersker med udekørende funktion i hjemmeplejen
<b>Formål</b>	At have sterile instrumenter/utensilier og stålæsker At forebygge at borgere og medarbejdere pådrager sig infektioner ved genanvendelse af instrumenter/utensilier
<b>Mål</b>	En korrekt steriliserings proces af utensilier At Autoklaven lever op til krav om sterilitet
<b>Instruks Autoklavering</b>	Autoklavering: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vask instrumenter/æsker af med vand og sæbe (der forefindes særlig balje og børster til dette formål alene)</li> <li>2. Læg instrumenterne i plastikbeholder (til formålet)</li> <li>3. Instrumenterne overhældes med kogende vand, der hældes fra igen</li> <li>4. Instrumenterne overhældes for anden gang og vandet skal dække instrumenterne med 1 cm.</li> <li>5. Beholder med instrumenter og vand koges i mikrobølgeovn i 2 min. på højeste Watt</li> <li>6. Vandet hældes fra og instrumenterne tørres efter med et rent viskestykke</li> <li>7. Instrumenterne pakkes i sæt i æsker, der lukkes med autoklave tape. Husk at påføre dato og om der er skarpske med i æsken.</li> <li>8. Sættene stilles i autoklaven og autoklaven startes. Autoklaven kører i ca. 120 min. og sættene kan derfor tages ud næste dag.</li> </ol>
<b>Sporeprøve kontrol</b>	Mindst én gang om måneden kontrolleres sterilisationen ved hjælp af biologiske indikatorer (sporeprøver): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testen udføres efter producentens anvisning på de programmer, der anvendes i området</li> <li>• Der anvendes 3 sporeprøver</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sporeprøverne anbringes forskellige steder i autoklaven på de vanskeligst tilgængelige steder, og i de forskellige typer af anvendt emballage (fx i kassetter, indpakket mellem instrumenterne). Placeringen af sporeprøverne noteres</li> <li>• Autoklaven pakkes og køres som sædvanlig</li> <li>• Efter sterilisation fjernes sporeprøverne og sendes til SSI til undersøgelse for vækst</li> <li>• Hvis sporeprøverrapporten fra SSI viser tegn på vækst i én af prøverne, foretages ny sporeprøvetest.</li> <li>• Hvis der stadig er vækst i én prøve, skal autoklaven fejlmeldes og repareres</li> <li>• Efter reparation skal der udføres endnu en sporeprøvetest.</li> <li>• Den reparerede autoklave må først tages i brug igen, når sporeprøverrapporterne er modtaget og er fejlfrie.</li> <li>• Modtages en låneautoklave, skal den ligeledes være sporeprøvet.</li> <li>• SSI sender "Diplom"/attest der bekræfter at autoklaven er godkendt.</li> </ul> <p>SSI sender sporprøver til de enkelte områder</p>
<b>Lokale tillæg</b>	
<b>Lovgrundlag Referencer Kilder</b>	SST NIR i almen praksis CEI 1. udgave 2015