

**BRONDBY KOMMUNE****Ældre og Omsorg/ Æblehaven****Udarbejdet af: Helle Larsen****Godkendt i ledergruppen****Ansvarlig:****Revideret: April 2015, juni 2017, juli 2018, oktober 2020****Revideres senest: oktober 2022****Æ1.0**

<b>Instruks vedrørende:</b> Hjertestarter	
<b>Målgruppe</b>	Alle ansatte
<b>Formål</b>	At alle kender til hjertestarterens placering og forholdsregler omkring den.
<b>Mål</b>	At hjertestarteren er klar til brug, når der er et behov for det.
<b>INSTRUKS</b>	Hjertestarteren er tilmeldt registret for hjertestarter.
<b>Placering</b>	For enden af aulaen, i centerbygningen, Guldborgvej 6, til venstre for udgangen til haven
<b>Hvordan</b>	Start basal genoplivning, <b>Ring 112</b> , hent hjertestarteren, følg den talte vejledning fra hjertestarteren.
<b>Borgere udenfor ÆH</b>	Kan via alarmcentralen blive henvist til hjertestarteren. I weekender og efter kl. 15 på hverdage bliver de henvist til <b>Guldborgvej 4 (hus 4), medarbejderen fra huset</b> , skal følge personen op til hjertestarteren og udlevere denne.
<b>Efter brug</b>	Hvis hjertestarteren: <ol style="list-style-type: none"><li>1. har været hentet men ikke blev taget i brug hænges den tilbage. Tjek, at der står OK i displayet, inden den hænges på plads.</li><li>2. har været i brug, tages den som regel med af Falck /redderne til brug for aflæsning af data.</li><li>3. Hjertestarter vil blive sendt retur med taxa og vil i de fleste tilfælde være retur inden for ca. 24 timer.<ul style="list-style-type: none"><li>- Der vil være et skema med som oplyser, hvordan man kan rekvirere elektroder og sender regningen til region hovedstaden, hvis den ikke er fyldt op med disse.</li></ul></li><li>4. Hvis <b>ikke</b> Falck tager hjertestarter med skal den <b>straks</b> genopfyldes med det som mangler.</li><li>5. Mundstykket der hænger i den sorte pose, rengøres i sæbevand og sprittes af og lægges tilbage i posen, <b>straks</b> efter brug</li><li>6. Skriv en mail til administrationen, fællespostkasse: <a href="mailto:ab-lehaven@brondby.dk">ab-lehaven@brondby.dk</a> oplys, at hjertestarteren har været i brug og hvad der skal bestilles.</li><li>7. Administrationen lægger de tilsendte vare eller besked om at de er kommet hjem, til hus 7/ område C.</li></ol>

<p><b>Tilbehør</b></p> <p><b>Psykologhjælp</b></p> <p><b>Tjek og eftersyn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ugentligt</b></li> <li>- <b>Årligt</b></li> </ul> <p><b>Kontaktperson Region Hovedstaden</b></p>	<p>8. Hus 7's, personale er ansvarlig for at fylde hjertestarter kassen op i akutrømmet</p> <p>Elektroder og engangs "mundstykker" i nøglering findes i kassen i akut rummet i kælderen.</p> <p>Engangs "mundstykker", bruges i det tilfælde at der ikke er mundstykke på hjertestarten og de rekvireres via nærmeste leder eller teknisk service</p> <p>Nye mundstykker bestilles på 70 25 66 11 og leveres max. 3 dage senere. Uanset hvad der bestilles, kommer der en fuld pakke med batteri, pads m.m.</p> <p>Hvis hjertestarteren har været i brug og personalet efterfølgende har behov for psykolog hjælp kan de ringe, til Falck Healthcare på 70 10 20 12. og kundnr. 20 61 39 34 oplyses.</p> <p>Husk altid at orientere nærmeste leder på mail.</p> <p><b>Selve hjertestarteren:</b></p> <p>Administrationen tjekker udløbsdato og at der er det korrekte tilbehør til hjertestarter én gang ugentligt og displayet to gange ugentligt</p> <p>Falck efterser og udskifter batteri og oplader én gang årligt.</p> <p>Tilbehør i AKUT rum: Område C tjekker udløbsdato 1x årligt</p> <p>Martin Fjorholdt (Herlev Hospital). Tlf. 2482 3658</p>
<p><b>Lovgrundlag</b></p> <p><b>Referencer</b></p> <p><b>Kilder</b></p>	<p>Førstehjælpbog og hjertestarterhæfte, som ligger ude i nogle huse</p> <p>VAR: <a href="https://www.varportal.dk/">https://www.varportal.dk/</a></p> <p><a href="#">Forside</a> &gt; <a href="#">SØG</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt; <a href="#">Førstehjælp</a></li> <li>• &gt; <a href="#">Livreddende førstehjælp</a></li> <li>• &gt; <a href="#">Hjerte-lungeredning</a></li> <li>• &gt; <a href="#">Hjerte-lungeredning med hjertestarter</a></li> </ul>