

## Monteringsvejledning Safebed Sengesensor

1. Føleren (figur 1) placeres under madrassen på et sengelamel (fæstnes til en lamel med medfølgende strips i rillerne på sensoren, følg piktogrammerne på føleren. Skal placeres mellem borgerens navle og skuldre, afhængig af borgers højde og placering i sengen, hvilket svarer til 2. – 3. lamel fra knækket i hovedgærdet. Kablet fra føleren tilsluttes i boksen (figur 2)
2. Kablet fra M boksen (figur 3) isættes boksen (figur 2)
3. Strøm adapteren (figur 4) tilsluttes boksen (figur 2), og strømstikket tilsluttes en tændt stikkontakt. (der ligger et dobbeltstik i æsken)
4. Sæt boksen (figur 2) med tilhørende bøjle på sengekant eller yderside af sengegavl.
5. Sengesensoren er nu klar til at blive installeret på borgerens vægpanel, følg nedenstående instruks.

1. Hold grøn knap på værelsespanelet inde til der kommer en "Tone"
2. Tryk på alarmtasten på M boksen (figur 3) og afvent "Tone"
3. Tryk Rød knap og afvent "Tone"

Sengesensoren er nu klar til brug, når borgeren ligger i sengen tændes sengesensoren ved at holde den lille orange knap i boksens bund (se pil ved figur 2) inde til du hører et "Bip", herefter tændes M boksen (figur 3) på siden af boksen, nu vil sensoren give alarm via nødkaldet hvis borgeren forlader sengen, når en alarm er gået genindkobles boksen (figur 2) ved at holde den lille orange knap inde til du hører et "Bip", nu er sengesensoren klar til brug igen.

Husk! Sluk sensoren når den ikke er i brug, den slukkes som den tændes ved at holde den lille knap inde til du hører et "Bip" (se bilag 1 til F3.14 Quickguide til Safebed).

