

BRONDBY KOMMUNE**Ældre og Omsorg****Udarbejdet af:** Demenskonsulenterne centrene december 2022**Ansvarlig:** Marianne Strømsted**Revideret:** dec. 2022**Revideres senest:** december 2025

Instruks:	Sengesensor Safebed Emfit – automatisk tryghedskald til forebyggelse af fald og alvorlig skade
Målgruppe	Demenskonsulenter, sygeplejersker, terapeuter og serviceafdelingen i ældre og omsorg
Formål	Forebygge fald hos borgere der grundet kognitiv funktionsnedsættelse ikke forstår konsekvensen af egne handlinger. Forebygge at en borger der er faldet kommer til at ligge for længe inden hjælpen kommer. Understøtte borger egne ressourcer ved at de fortsat kan klare fx toiletbesøg eller forflytninger
Mål	Sikre at alle ansatte forstår hvornår og hvordan Safebed kan forebygge fald Skabe tryghed for pårørende og borger
Målgruppe for Safebed	Der kan anmodes om Safebed, hvis borgeren: Haft gentagende fald og Safebed vurderes enten at kunne forebygge fald eller minimere skade samt understøtte borgerens egne ressourcer.
Hvordan fungerer enheden	Safebed registrerer hvis borgeren forlader sengen og sender et nødkald til afdelingens nødkaldstelefon. Enheden kan opsættes til et ønsket tidsinterval for hvornår den sender nødkald, fx hvis borgere skal have mulighed for at selv gå på toilettet og vende tilbage i seng. Mindste tidsramme er dog ca. 90 sekunder.
Hvordan bestilles og returneres enheden	Behov for Safebed vurderes i samråd med sygeplejerske, terapeut eller demenskonsulent. Demenskonsulent eller terapeut anmoder serviceafdelingen om montering af Safebed og sikrer at personalet er i stand til at betjene den. Ved returnering kontaktes demenskonsulent eller terapeut der anmoder serviceafdelingen om nedtagning.
Ansvar og samtykke	Hvis borgeren har en demenssygdom kan sygeplejerske, terapeut og/eller demenskonsulent afgøre, om der som led i omsorgen skal anvendes Safebed. Der skal ikke indhentes samtykke, men borgeren, pårørende og værge/ fremtidsfuldmægtig skal informeres inden brugen af teknologien. Safebed må kun bruges så længe det fagligt vurderes nødvendigt. Hvis borgeren har en betydelig og varig nedsat funktionsevne der ikke skyldes demens , er sygeplejerske, terapeut og/eller

	<p>demenskonsulent ansvarlig for, at indhente samtykke fra borger og værge/ fremtidsfuldmægtig, samt orientere pårørende, inden brugen af teknologien.</p> <p>Hvis borgeren aktivt modsætter sig anvendelse af Safebed i ord eller handling, findes der ikke hjemmel i lovgivningen til at benytte teknologien.</p> <p>Demenskonsulent, terapeut eller sygeplejerske er ansvarlig for, at der oprettes Handlingsanvisning på baggrund af relevant <i>Tilstand, Indsats og Indsatsmål</i>. Relevant <i>Tilstand</i> vil oftest være: <i>mobilitet og bevægelse</i> <i>Indsatsen</i> altid <i>Alarm- og pejlesystemer</i> <i>Indsatsen</i> planlægges i <i>Kalenderen</i>.</p> <p>Begrundelse for anvendelse af Safebed beskrives i <i>Tilstanden</i> og evt. samtykke/orientering samt tilkendegivelse, dokumenteres i et <i>Sagsnotat</i> som relateres til <i>Tilstanden</i>. <i>Indsatsmål</i> og <i>Handlingsanvisning</i>, samt opfølgingsdato, skal løbende ajourføres i journalen.</p>
Lokale tillæg	<p>Bilag 1 til F3.14 Quickguide med billeder til betjening af Safebed Bilag 2 til F3.14 Monteringsvejledning til Safebed Bilag 3 til F3.14 Emfit Safebed Brugermanual Engelsk</p>
Lovgrundlag Referencer Kilder	<p>Serviceoven kap. 24 og 24 b § 128b og 136e.</p>