



## Quickguide med billeder til betjening af Safebed

Inden beboeren kommer i seng:

1. **Tænd** på boksen, der hænger på sengegavlen. Den orange knap holdes ind mens der tælles til 3 sekunder. Der kommer et bip og den blå lampe blinker. Når Beboeren ligger i sengen blinker grøn lampe. Alarmen er nu aktiv.

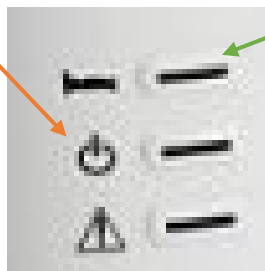

2. **Hvis beboeren forlader sengen og alarmen går** – sendes besked via nødkald. Alarmen slås fra på den røde knap ved at trykke kort; sig "2-1" og slip. Der kommer et bip – bip. Hvis du kommer til at slukke – skal du tænde igen ved at gentage punkt 1.
3. **Når beboeren er tilbage i sengen igen:** Tjek om boksen blinker blåt og grønt. Hvis ikke er den slukket. Tænd – se punkt 1.
4. **Sluk boksen** ved at holde orange knap ind i 3 sekunder, der kommer en bip-bip-bot lyd. Lamperne slukker.

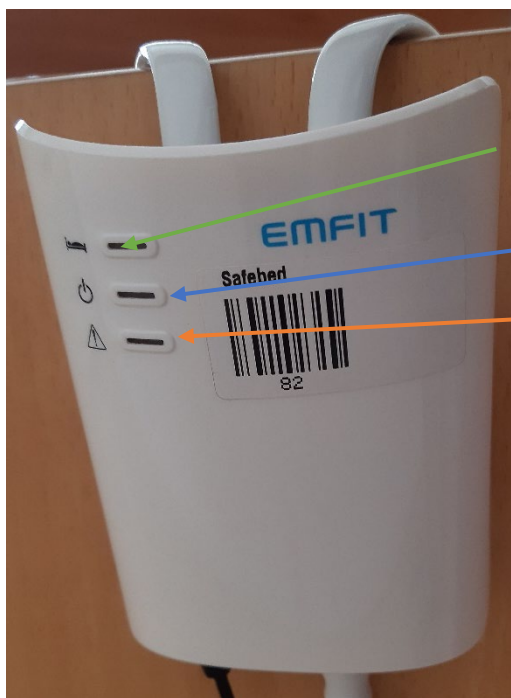

Grønt blinkende lys – alarmen er aktiv og den har registreret at beboeren ligger i sengen

Blåt blinkende lys – boksen er tændt

Rødt blinkende lys – fejl – giv besked til servicemændene