

Standardmadrasser på centrene

Ved tvivl om madrassens effekt kan tjekliste benyttes.

Tjekliste:

- Sengelinned fjernes.
- Efterse madrassens betræk for synlige huller -> hvis ja -> madrassen kasseres.
- Skummet skal rette sig/rejse sig efter håndtryk på madras.
- Lyn betrækket op og efterse om der er skjolder på bagsiden -> hvis ja -> madrassen kasseres.
- Mål højden på madrassen, når sengens liggeflade er vandret. Brug evt. en lang, helt lige lineal -> læg denne på tværs af madrassen -> mål højden flere steder -> synker madrassen mere end 1½ cm -> hvis ja-> madrassen kasseres.

Info den 4.febr 2016 fra Invacare:

Vores konsulent der har mange års erfaring med madrasser siger at vores Dacapo Square gerne holder 4-6 år – og levetiden er naturligvis afhængig af om de bliver udsat for væske.

Man kan lige tage betrækket af og se, om skummet er faldet lidt sammen.

Vibeke Hastrup

Kundeservice / Customer Service

E-mail: vhastrup@invacare.com

Telephone: +45 3690 0040

Invacare A/S

Tjekliste for madrasserne Dacapo Basic/Square/Combi er udarbejdet på baggrund af info fra hjælpemiddelfirmaet Invacare, Brøndby juni 2014. Udarbejdet af ergoterapeuterne Ingemarie Hansen, Hanne Johnsen og Jette Hørning fra Træningscenter Brøndby.