

Bilag til instruks F3.3 vedrørende *trykafastende foranstaltninger*, udarbejdet i tryksårsgruppen aug.2016

Katalog over trykafastende foranstaltninger i kørestol og seng

Trykafastende puder til kørestole



Decudan pude

- Trykfordelende
- Forebygger siddesår
- Skummet er opskåret i firkanter, således at overfladespændingerne mindskes og kroppens overflade holdes naturligt tør.
- Vedligeholdelse: Ingen, dog tjek at skummet er intakt.



Vicair pude

- Beregnet op til tryksårskategori 4
- Bygget op i flere kamre, fyldt med luftceller (trekanter).
- Kan bruges ved komplekse positioneringsbehov, hvor optimal og korrekt siddestilling samt forebyggelse mod tryksår er højt prioriteret.
- Fås med inkontinensbetræk
- Brugervægt 250 kg
- Vedligeholdelse: skal rystes dagligt, så cellerne fordeles.
- Læs mere: <http://www.hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=8081>



Roho pude

- Beregnet til tryksårskategori 4
- Neoprengummi, fungerer med indbyrdes forbundne 10 cm høje luftceller, som indstilles efter brugerens behov. Puden, som også øger stabiliteten, indstilles vha. en enkelt ventil og en luftkontrol. Lev. med betræk, pumpe, reparations sæt og dansk brugsvejledning.
- Fås med inkontinensbetræk
- Brugervægt max 400 kg
- Vedligeholdelse: skal tjekkes for luft dagligt (håndtest)
- Læs mere: <http://www.hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=11093>

Sådan kommer du luft i roho-puder:

1. Tryk den **grønne knap** ind. Åben ventilen i siden af puden og pump luft i puden.
2. Fjerne pumpen og luk ventilen.
3. Sæt brugeren på puden.
4. Læg hånden mellem brugerens laveste stikkende knoglefremspring og puden. Luk luft ud fra ventilen til brugeren synker ned i puden. Når fingrene kan vippe ca 2 cm mellem bruger og bund, lukkes ventilen.
5. Ret op i den ønskede siddestilling, og tryk den **røde knap** i bund. Luften isoleres nu i de 4 kamre og giver stabilitet.
6. Kontrollér at brugeren ikke sidder igennem puden.

Bilag til instruks F3.3 vedrørende *trykafastende foranstaltninger*, udarbejdet i tryksårgruppen aug.2016

Trykafastende madrasser



Dacabo Square

- Trykafastende standardmadras
- 8 cm organic skum øverst og 6 cm koldkum nederst
- Tryksårstadiet 0-1
- Max brugervægt 140 kg



Roho Sofflex 2

- Topmadras til forebyggelse og behandling af tryksår
- Statisk luftmadras
- Tryksårstadiet 1-3
- Max brugervægt 136 kg



Softair Excellence

- Til patienter med høj risiko for at udvikle tryksår
- Vekselrykmadras
- Tryksårstadiet 4
- Max brugervægt 140 kg

Svært undervægtige

Der forefindes endvidere madrasser til svært undervægtige. Udfyld scoreskema med uddybende begrundelse.