

Hjemmeplejen

Udarbejdet af: Sussi H. Qvist, Laila Lavesen juni 2017

Godkendt i Ledergruppen d.: Juli 2017

Ansvarlig: Laila Lavesen

Revideres senest: Juli 2019

Revideret:

Træder i kraft d.: August 2017

Instruks vedrørende: Strømpepåtager Doff N Donner	
Målgruppe	Plejepersonalet i Hjemmeplejen
Formål	Sikre kvaliteten af strømpepåtager
Mål	At sikre, at hos borgere der har særlige behov for hjælp til støttestrømper, kan anvendes Doff N Donner
Instruks	<p><u>Medarbejder</u></p> <p>Inden der søges om Doff N Donner, skal følgende hjælpemidler være afprøvet hos borgeren, derudover skal det dokumenteres hvordan effekten af afprøvningsne har været i borgerens journal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Easyslide og spielerdug • Gummihandsker • Vejledning og faglig bistand af ergoterapeut i hjemmeplejen. • Vejledning og faglig bistand af forflytnings ressource person. <p>Overvej også:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om borger kan inddrages med Aktiverende Hverdagstræning og selv være med til at tage støttestrømperne på og af med en dressbody. • Om borger kan Hverdagsrehabiliteres, til selv at tage strømper på og af. <p>I begge tilfælde kan faglig bistand hos ergoterapeuten og forflytningsressourceperson inddrages. Og i begge tilfælde skal det dokumenteres hvordan effekten af afprøvningsne har været i borgerens journal.</p> <p>Når alle muligheder er afprøvet og dokumenteret:</p> <p>Sendes besked til egen gruppeleder, der undersøger om alle andre muligheder for hjælpemidler er afprøvet og dokumenteret. Derudover skal det være dokumenteres hvordan effekten af</p>

afprøvningsen har været.

Først herefter vurderes der om Doff N Donner er det korrekte hjælpemiddel.

Ressourceperson for Hjælpemidler og/eller ergoterapeut samt gruppeleder

Vurderer behov for Doff N Dunner, og om det er et CPR – eller et APV relateret hjælpemiddel, hvorefter der søges om dette.

CPR relateret hjælpemiddel: det er borgers personlige hjælpemiddel, og skal være i borgerens hjem.

APV relateret hjælpemiddel: det er medarbejder relateret hjælpemiddel, og skal ikke være i borgerens hjem.

Vejledning

Vejledning på Doff N Dunner

Vedlægges og evt. sættes fast på Duff N Dunner, så der ikke er tvivl om anvendelse af hjælpemidlet, af Ressourceperson.

Vejledning til Doff N Donner

EncoStore.DK
Ortopædiske specialvarer

Strømpepåtager

0. Fjern skarpe genstande så som smykker mv.
1. Introduktion - Doff N Donner er fremstillet i silikone og er fyldt med saltvand med tilbehøret **keglen**, som bruges til at rulle strømper på med. Doff N Donner kan anvendes til knæstrømper, høje strømper samt strømper med åben tå.



2. Sæt keglen fast
- Nedeunder keglen sidder en sugkop og et håndtag.
 - Sørg for at håndtaget peger mod højre, før keglen skal sættes fast.
 - Sæt keglen på en ren bordplade eller et rent gulv med en nogenlunde glat overflade (træsøflader med for meget struktur kan være et problem).

- d. Lås sugekoppen fast ved at dreje håndtaget mod urets retning, så det peger mod venstre (Gode råd: giv evt. et tryk ned på keglen, mens du lukker sugekoppen. Have en fugtig klud i nærheden, så du kan tørre sugekoppen før montering).



3. Kør strømpen ned over keglen
- Sørg for at strømpens hæl er vendt ind mod dig.
4. Rul Doff N Donner ned over keglen
- Rul Doff N Donner helt ned til strømpeskanten.
 - Vær opmærksom på, hvor hælen i strømpen er.
 - Træk strømpen op omkring Doff N Donner og stram til.
 - Rul Doff N Donner helt op, så det ligner en lille tromme.



5. Påfør strømpen
- Sæt den ende, der ligner en tromme, mod tæerne og hold strømpens hæl nedad.
 - Rul Doff N Donner op indtil strømpen er rullet helt af.
 - Vær forsigtig ved hælen.
 - Rul Doff N Donner af igen.
 - Om nødvendigt, hiv forsigtigt strømpen på plads evt. med handsker.
6. Tag strømpen af
- Rul Doff N Donner op ad benet til lige før strømpeskanten.
 - Træk strømpen udover Doff N Donner og rul strømpen af.
7. Pleje af Doff N Donner
- Daglig rengøring af Doff N Donner og keglen med varmt vand og sæbe (gerne antibakteriel sæbe). Desinfektion med isopropylalkohol.

Har du spørgsmål eller feedback, så kontakt support@encostore.dk eller tlf. 42 50 43 80
2017 © EncoStore, Scisess Medicon

Link:

You tube:

<https://www.youtube.com/watch?v=R5gK9hkPwo0>

Rengøringsvejledning:

<http://www.hmi-basen.dk/blobs/brugsvej/42825.pdf>

Lokale tillæg

Lovgrundlag Referencer Kilder